

ASSISI

LOOP[®]



The Assisi Loop[®]

非入侵性非藥物性消炎裝置(NPAID, non-pharmaceutical anti-inflammatory device) 採用標靶脈衝式電磁場療法 (tPEMF[®]), 利用微電流促進癒合及減輕痛楚。



Assisi Loop[®] 採用低能量脈衝式電磁場作消炎及減輕痛楚。Assisi Loop[®]為標靶脈衝式電磁場裝置, 操作簡易, 方便在家居使用。Assisi Loop[®]的使用並不干擾現有標準治療過程或痛症管理, 亦有效於與激光治療、針灸、止痛及消炎藥物併用

運作原理:

Assisi Loop[®]的訊號100%加強組織吸收一氧化氮NO及能於15分鐘的療程內飽和目標組織

1

Assisi Loop[®]正調控鈣離子Ca²⁺與鈣調蛋白CaM的結合, 促進一氧化氮NO的產生

2

一氧化氮NO加速消炎作用

3

Assisi Loop[®]的訊號同時加快血液循環及增加血含氧量

4

從而有效地喚醒身體的自癒能力



治療深度為Loop直徑的1.25倍 (25cm或12.5cm), 並延伸至線圈的上方及下方

如寵物的炎症和痛症發作的部分位於治療範圍內, Assisi Loop[®]能夠作出治療

- ☑ 慢性或退化性炎症如骨關節炎
- ☑ 神經炎症如椎間盤突出
- ☑ 骨科創傷如十字韌帶斷裂
- ☑ 手術後疼痛及腫脹或急性炎症
- ☑ 內科炎症疾病如胰臟炎
- ☑ 傷口癒合



特色

- 非入侵性非藥物性無痛消炎裝置
- 供應兩種尺寸10cm及20cm
- 裝置輕巧易用, 只需放在患處上或附近範圍便可進行治療
- 可進行至少150次15分鐘療程
- 獲多項設計、製程及使用方法專利
- FDA認可治療人類手術後痛楚及水腫
- 可由獸醫在醫院內或主人在家中使用
- 只能由專業獸醫出售
- 美國製造

優點及長處

- 適用於任合動物品種
- 可穿透石膏、包紮、骨科植入物
- 提供醫院外持續治療
- 供不適合非類固醇消炎藥物(NSAIDs)的患者多一個選擇
- 適合與藥物或替代療法併用

香港獨家代理



PAWS IN MOTION



+852 93577541



www.pawsinmotion.hk

使用說明

多謝您為您的寵物選擇Assisi，一個非入侵性非藥物療法。Assisi Loop提供150次15分鐘的療程，必須依照您的獸醫指示而使用於寵物身上


1. 將Assisi Loop的中央放在需要治療的部位上
2. 按開關掣一次。開始使用15分鐘的療程
3. 裝置會在15分鐘後自動關機
4. 如果您希望使用少於15分鐘，亦可以按開關掣手動關機
5. 為保最佳電池壽命，除非另有獸醫指示，否則請保持每次療程之間相隔兩小時
若您的獸醫處方更頻密的療程，裝置電池壽命將大大地減少
6. 請盡量保持裝置的環形，以達致最佳療程範圍

Assisi Loop®怎麼運作?

Assisi Loop®採用標靶脈衝式電磁場療法 (tPEMF®)，利用微電流針對身體原生消炎過程。微電流促進一氧化氮的產生，加快軟硬組織癒合；包括皮膚，腱，韌帶，骨，和內臟。

您的獸醫可以建議Assisi Loop®作獨立治療，亦可以用以輔助，配合其他在診所內進行的治療。此裝置容易攜帶並操作簡單，讓寵物主人進行居家治療。

Proven Science. Positive Results.

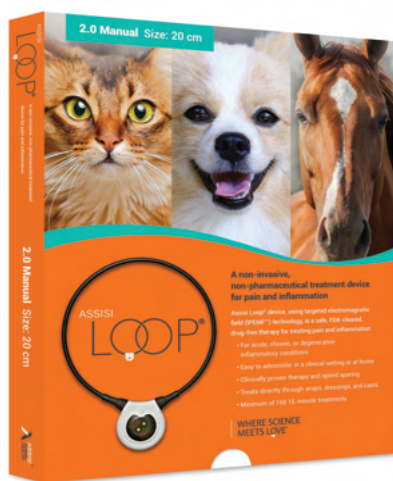

使用Assisi Loop®的頻度

標準療程:

- » 為達致最佳效果，在首7至10天，每天進行2至4次的起始劑量療程

- » 我們建議急性病患者，(如手術後治療或受傷的復康治療)，在首星期持續每天使用3至4次，然後可隨著寵物的進度而減至每天使用1至2次

- » 一些長期或退化病症的病患者，可持續治療直到活動能力有所進步和減輕痛楚，寵物主人應與專業獸醫合作而決定何時或如何減少療程次數

Assisi Loop®有何優點?

- ✓ 減低痛楚及具有消炎作用
- ✓ 增加活動度
- ✓ 改善血液循環
- ✓ 加快癒合

多久可見功效?

急性病患者者的顯著緩解應在首一至兩次使用下能察覺。長期病患或退化病症的顯著結果則可能在一至兩星期內不容易察覺。請依照上述指引繼續使用以達至持續康復。

安全注意

- Assisi Loop本身沒有使用者可以自行維修的部份。當電量耗盡後，您需要一個全新的Assisi Loop
- 不要讓Assisi Loop沾水
- 裝置不適合在充滿易燃氣體的環境下使用(例如麻醉氣體，或富氧環境下)
- 脈衝式電磁場治療(PEMF) 不適合用於已植入心血管或神經植入物的病患者